

Navodila za uporabo

Po odprtju sterilnega ovoja z obeh strani VIVAMEL obloge odstranite zaščitno prozorno folijo. Priporočamo vam, da okolico rane zaščitite z ustreznim zaščitnim mazilom. VIVAMEL obloge namestite na očiščeno rano. Nato namestite sekundarno oblogo, ki je lahko v primeru obilnega izločka iz rane visoko vpojna obloga ali PU pena, v primeru manjšega izločka komprese iz vlaknovine ali PU film. Vse skupaj pritrdite s pritrdilnim povojem.

V začetku zdravljenja priporočamo menjavo preveze na dva dni, v primeru obilnega izločka pa vsak dan, ker visoka prisotnost izločka znižuje učinke delovanja medu. Pri ranah z zelo malo izločka je dovolj, da prevezo izvajate 2 x tedensko. VIVAMEL oblogo namestite tako, da je v tesnem stiku z rano, da pride do kar najboljšega osmolarnega delovanja. VIVAMEL obloge lahko režete na želeno dimenzijo ali jih zložite v obliki rane. Pred vsako prevezo rano izperite s toplo tekočo vodo in milom ali s fiziološko raztopino. Alginate temeljito odstranite, okolico rane osušite in šele nato namestite novo oblogo.

V primeru, da je rana obložena s fibrinskimi oblogami, naj medicinsko osebje le-te odstrani, ker zavirajo celjenje rane.

Opozorila

Čeprav so alergije na med redke, pri ljudeh z dokazano alergijo na med ali čebelji strup odsvetujemo uporabo medicinskih pripomočkov z vsebnostjo medu.

Klinična testiranja celjenja ran z VIVAMEL oblogami pri sladkornih bolnikih kažejo zelo dobre izkušnje in rezultate, vsekakor pa naj zdravljenje poteka pod zdravniško kontrolo.

Takoj po namestitvi obloge se lahko pojavi občutek mravljinčenja, ali rahlo pekoč občutek, ki običajno izgine po nekaj minutah. V primeru dolgotrajnega občutka bolečine je priporočljivo uporabiti drug tip obloge.

Priporočamo, da zdravljenje po štirih tednih oceni medicinsko osebje.

Obloge z medom in drugi pripomočki morajo biti priporočeni s strani medicinskega osebja.

Obloge so namenjene za enkratno uporabo.
Obloge so uporabne tri leta od datuma proizvodnje.

Shranjevanje

Obloge se shranjujejo pri temperaturi od 5 do 35° C.